

MED<sup>9</sup>EL



AudioLink XT

Stručná příručka



# Obsah

Přehled částí AudioLink XT . . . . .	1	Sledování televize . . . . .	9
Sestavení jednotky AudioLink XT . . . . .	2	Používání dálkového mikrofónu . . . . .	10
Otevření jednotky AudioLink XT . . . . .	3	Používání dálkové telefonní cívký . . . . .	11
Nabíjení jednotky AudioLink XT . . . . .	4	Používání FM přijímače . . . . .	12
Zapnutí/vypnutí jednotky AudioLink XT . . . . .	5	Světelné kontrolky . . . . .	13
Párování s audio procesorem . . . . .	6	Péče a údržba . . . . .	17
Poslech hudby . . . . .	8	Řešení problémů . . . . .	18

Stručná příručka k jednotce AudioLink XT je určena pro rychlou orientaci při manipulaci s vaším připojovacím zařízením. Podrobné informace k určenému použití, indikacím, kontraindikacím, varováním a bezpečnostním opatřením týkajícím se jednotky AudioLink XT nebo úplné informace o dokovací stanici a jiném příslušenství naleznete v návodu k obsluze jednotky AudioLink XT.

# AudioLink XT



## Sestavení jednotky AudioLink XT



- 1** Připojte jednotku baterie a hlavní jednotku, začněte v dolní části.
- 2** Stiskněte obě části najednou, dokud jednotka baterie zcela nezapadne do hlavní jednotky.
- 3** Kontrolka stavu začne blikat a indikovat tak, že je jednotka AudioLink XT připravena k použití.

# Otevření jednotky AudioLink XT



- 1 Vložte nástroj pro otevírání do drážky.



- 2 Zasuňte nástroj pro otevírání do jednotky AudioLink XT zleva doprava, dokud se hlavní jednotka a jednotka baterie od sebe neoddělí.

# Nabíjení jednotky AudioLink XT



- 1** Otevřete gumový kryt zdiřky.
  - 2** Zapojte mikro USB kabel do zdiřky nebo umístěte jednotku AudioLink XT do dokovací stanice. Zapojte napájecí adaptér USB nebo dokovací stanici do zásuvky.
  - 3** Při nabíjení bude kontrolka stavu svítit oranžově. Když se kontrolka stavu rozsvítí zeleně, jednotka AudioLink XT je plně nabitá.
- !** Jednotka AudioLink XT je dodávána s baterií, která je pouze částečně nabitá. Doporučujeme, abyste baterii před zahájením používání jednotky AudioLink XT plně nabili.

# Zapnutí/vypnutí jednotky AudioLink XT



**1** Pro zapnutí jednotky AudioLink XT stiskněte hlavní tlačítko po dobu přibližně 2 sekund.

**!** Jednotka AudioLink XT se automaticky vypne, není-li používána po dobu 5 minut nebo není napájena pomocí USB.

**2** Kontrolka stavu začne svítit zeleně nebo oranžově a indikuje tak, že je jednotka AudioLink XT zapnutá.

**3** Pro vypnutí jednotky AudioLink XT stiskněte znovu tlačítko po dobu 2 sekund.

# Párování s audio procesorem

- 1 Vypněte audio procesor.
- 2 Stiskněte hlavní tlačítko po dobu přibližně 2 sekund pro zapnutí jednotky AudioLink XT a ujistěte se, že je v pohotovostním režimu. Svítí pouze kontrolka stavu.
- 3 Stiskněte současně tlačítka telefonní cívky a mikrofonu po dobu přibližně 2 sekund.





- 4 AudioLink XT je nyní v režimu párování po dobu přibližně 60 sekund. To je indikováno nepřetržitým dvojitým blikáním symbolů připojení.
- 5 Umístěte audio procesor do blízkosti jednotky AudioLink XT a zapněte jej. Po nalezení audio procesoru přestane symbol na připojené straně blikat.
- 6 Jste-li bilaterální uživatel, zopakujte krok 4 s druhým audio procesorem.
- ! Režim párování můžete kdykoli ukončit stisknutím libovolného tlačítka.



AudioLink XT

# Poslech hudby

Připojte svůj telefon nebo jiné zařízení pro přehrávání hudby k jednotce AudioLink XT a vysílejte hudbu bezdrátově do vašeho audio procesoru.

- 1** Připojte svůj telefon nebo jiné zařízení k jednotce AudioLink XT pomocí dodaných kabelů.
- 2** Vyberte hudbu, kterou byste chtěli poslouchat, a stiskněte přehrávání.
- 3** Hudba se začne vysílat do vašeho audio procesoru.



AudioLink XT

# Sledování televize

Pro lepší poslech televize v celé místnosti můžete použít jednotku AudioLink XT společně s dokovací stanicí.

- 1** Připojte dokovací stanici k vašemu televiznímu přijímači pomocí kabelu RCA.
- 2** Otevřete gumový kryt zdičky a vložte jednotku AudioLink XT do dokovací stanice.
- 3** Zahajte vysílání zapnutím televizního přijímače.



Pokud váš televizní přijímač nemá výstupní zdičky RCA, použijte komerčně dostupné adaptéry DAC RCA.



# Používání dálkového mikrofону

Jednotku AudioLink XT lze použít jako dálkový mikrofón vysílající zvuk z vašeho prostředí přímo do vašeho audio procesoru. Lze ji použít jak ve skupinových situacích, tak v individuálních konverzacích.

- 1 Pro zahájení vysílání stiskněte tlačítko Mic.
- 2 Tlačítko Mic se rozsvítí a indikuje, že je aktivován dálkový mikrofón.
- 3 Chcete-li dálkový mikrofón efektivně umístit pro skupinové konverzace, můžete jednotku AudioLink XT vložit do dokovací stanice.
- 4 Chcete-li ukončit režim vzdáleného mikrofónu, stiskněte znovu tlačítko mikrofónu.



AudioLink XT

## Používání dálkové telefonní cívky

AudioLink XT lze použít jako vzdálenou telefonní cívku pro příjem signálů ze systémů indukčních smyček na krk a indukčních smyček pro přenos zvuku do audio procesoru.



- 1** Zapněte jednotku AudioLink XT.
- 2** Stiskněte tlačítko telefonní cívky.
- 3** AudioLink XT začne vysílat do vašeho audio procesoru. To je indikováno pomalým blikáním symbolů levého/ pravého připojení.
- 4** Chcete-li ukončit režim vzdálené telefonní cívky, stiskněte znovu tlačítko telefonní cívky.

## Používání FM přijímače

Připojením FM adaptéru k jednotce AudioLink XT se můžete připojit k FM přijímači, a získat tak snadný přístup k FM systémům.



**1** Zapněte jednotku AudioLink XT.

**2** Připojte FM přijímač k FM adaptéru a poté připojte adaptér do zásuvky USB na jednotce AudioLink XT.





**3** AudioLink XT začne vysílat do vašeho audio procesoru. To je indikováno pomalým blikáním symbolů levého/pravého připojení.

**4** Chcete-li zastavit vysílání z FM přijímače, odpojte FM adaptér z jednotky AudioLink XT.

# Světelné kontrolky



## Kontrolka stavu

Vzorec blikání	Význam	Nutné opatření
 ...	Jednotka AudioLink XT je aktivní	Žádné
 ...	Nabíječka je připojena a proces dobíjení ukončen	Vyměňte jednotku AudioLink XT ze zásuvky.
 ...	Jednotka AudioLink XT je aktivní a baterie je téměř vybitá	Dobijte baterii
 ...	Nabíječka je připojena a baterie se dobíjí	Žádné



## Symbyly levého/pravého připojení

Vzorec blikání	Význam	Nutné opatření
●●●●●●●●●●...	Jednotka AudioLink XT se synchronizuje s příslušným audio procesorem	Žádné
▲▲▲...	Jednotka AudioLink XT vysílá do příslušného audio procesoru	Žádné
■■■■■■■■■■...	Párování audio procesoru bylo úspěšné	Žádné
●●—●●—●●...	Jednotka AudioLink XT hledá audio procesor	Žádné





## Tlačítko Mix

### Vzorec blikání



### Význam

Audio vstup je kombinací signálu jednotky AudioLink XT a mikrofonů audio procesoru

### Nutné opatření

Žádné



## Tlačítko Mic

### Vzorec blikání



### Význam

Dálkový mikrofون aktivní

### Nutné opatření

Žádné



## Tlačítko telefonní cívky

Vzorec blikání	Význam	Nutné opatření
————— ●...	Dálková telefonní cívka je aktivní	Žádné



## Symboly Mix, Telefonní cívka a Mikrofon

Vzorec blikání	Význam	Nutné opatření
—	Resetování jednotky AudioLink XT	Žádné
●●—●●—●●...	Jednotka AudioLink XT je v režimu konfigurace	Žádné

## Péče a údržba

Jednotka AudioLink XT je navržena tak, aby byla odolná a spolehlivá. Pokud o něj budete správně pečovat, bude fungovat dlouhou dobu.

1. Zařízení nesmí spadnout na zem.
2. Nepokoušejte se opravit elektronické části jednotky AudioLink XT. Neotvírejte a neupravujte žádnou z komponent systému. Mohlo by dojít k poškození systému a pozbytí platnosti záruky.
3. Při nepoužívání skladujte jednotku AudioLink XT na bezpečném místě.
4. Chraňte jednotku AudioLink XT před průnikem kapalin, prachu a proti nadměrným teplotám.
5. Jednotku AudioLink XT nečistěte ve vodě ani pod vodou. Jednotku AudioLink XT čistěte navlhčenou tkaninou. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost ani alkohol.
6. Pro vysušení jednotky AudioLink XT nepoužívejte mikrovlnnou troubu ani jiná topná zařízení. Je-li to nutné, osušte ji suchou textilií.
7. Pro oddělení baterie od řídicí jednotky nikdy nepoužívejte nástroje s ostrými hranami, jako je šroubovák nebo nůž. Používejte pouze dodaný nástroj pro otevírání.
8. Pravidelně nabíjejte baterii jednotky AudioLink XT pro zachování její životnosti.

# Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Doporučený postup
Párování nefunguje	AudioStream, adaptér AudioStream nebo sluchadlo(a) aktuálně připojené k telefonu	Odpojte zařízení v telefonu nebo vypněte Bluetooth v telefonu.
Audio vysílání se nespouští. Symboly pravého a/nebo levého připojení na hlavním tlačítku nesvítí	Audio procesor není spárovaný s jednotkou AudioLink XT	Spárujte svůj audio procesor s jednotkou AudioLink XT
Přestože blikají symboly pravého a/nebo levého připojení, není během audio vysílání slyšet žádný zvuk	Audio procesor je mimo dosah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ujistěte se, že je audio procesor zapnutý</li><li>- Vyměňte baterii audio procesoru</li><li>- Přiblížte jednotku AudioLink XT blíž k audio procesoru</li></ul>

Problém	Možná příčina	Doporučený postup
Zkreslený zvuk během audio vysílání	Zařízení není v dosahu nebo je rušeno jinými zařízeními	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Přiblížte jednotku AudioLink XT blíž k audio procesoru</li> <li>- Odstraňte ostatní zařízení, která by mohla rušit bezdrátovou frekvenci, například internetové směrovače nebo počítače</li> <li>- Je-li to možné, použijte Wi-Fi pásmo 5 GHz</li> </ul>
Není slyšet žádný zvuk nebo je příliš ztlumen	Příliš nízká hlasitost	Zvyšte hlasitost na zařízení, následně na jednotce AudioLink XT
Zvuk je příliš hlasitý nebo zkreslený	Příliš vysoká hlasitost	Snižte hlasitost na jednotce AudioLink XT, následně na zařízení

Problém	Možná příčina	Doporučený postup
Vysílání s využitím dokovací stanice nebo audiokabelů nefunguje, přestože blikají symboly pravého a/nebo levého připojení	Audio kabel není správně připojen	Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojené a že je jednotka AudioLink XT v dokovací stanici správně umístěná
Jednotka AudioLink XT nereaguje	Jednotka AudioLink XT má neočekávaný problém	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vypněte jednotku AudioLink XT a znovu ji zapněte</li> <li>- Stisknutím hlavního tlačítka a tlačítka hlasitosti – na 7 sekund provedete měkké resetování.</li> </ul>





MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH  
Fürstenweg 77a, 6020 Innsbruck, Austria  
office@medel.com

medel.com

